



# KINERAPY

ADVANCED REHABILITATION TECHNIQUES

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### Палки для скандинавской ходьбы KINERAPY CARBON



Сертификат соответствия № РОСС DE.AM05.H02433 (с 21.06.2019 г. по 20.06.2022 г.) выдан ООО «Центр сертификации и экспертизы «Тверьэкс».

Система управления качеством сертифицирована в соответствии со стандартом EN ISO 13485.

**Изготовитель:** Рехард Технолоджис ГмБХ, Германия, 10785, Берлин, Потсдамер штрассе, 92.

**Импортер:** ООО «Орто Медикл Групп», Россия, 143405, Московская область, г. Красногорск, Ильинское шоссе, д. 16, корп. 1.

**Претензии направлять:** Россия, 127220, Москва, а/я № 58, ООО «НИКАМЕД» представитель в России и СНГ, тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: skk@nikamed.ru.

[www.kinerapy.com](http://www.kinerapy.com)

[www.nikamed.ru](http://www.nikamed.ru)

Арт.: INTKK-RW905-N3\_07/19

**Уважаемый покупатель!**

Благодарим Вас за выбор! Немецкая торговая марка KINERAPY объединяет опыт профессионалов в сфере здорового образа жизни и реабилитации. Миссия бренда – помочь Вам в улучшении качества жизни и достижении активного долголетия. Наша философия – движение, и только изделия бескомпромиссного качества помогают нам эффективно её реализовать. Выбранное Вами изделие произведено в соответствии с директивами ЕС и Германскими стандартами, обеспечивающими высокое качество и долговечность. Для эффективной эксплуатации, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с правилами использования изделий.

**Область и способ применения:**

Палки предназначены для специального вида ходьбы, называемой Скандинавская Ходьба или Северная Ходьба, или Nordic Walking.

**Конструкция:**


Телескопическая конструкция из трёх секций позволяет регулировать высоту от 67 до 135 см. Вес одной палки 240 грамм.

Рукоятка из пластика с пробковым покрытием предотвращает скольжение кисти. Съёмный темляк (полуперчатка) для левой руки обозначен буквой L, для правой руки буквой R. Темляки регулируются по объёму с помощью велкро-застёжки.

Съёмные резиновые наконечники (башмачки) надеваются при хождении по асфальту.

**Правила подбора:**

Палки для скандинавской ходьбы KINERAPY имеют универсальный размер и подходят для пользователей ростом от 140 до 200 см.

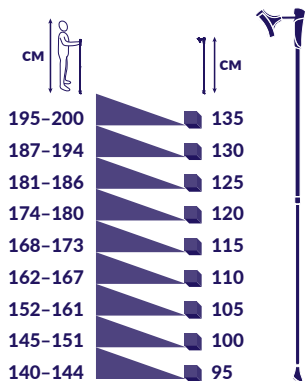

Внимание! Перед приобретением палок необходимо примерить темляки. Темляк должен застёгиваться на руке и не иметь точек сдавливания.

**Правила использования:**

Отрегулируйте высоту палки в соответствии с рекомендациями инструктора по Скандинавской Ходьбе, который определит Ваш индивидуальный тренировочный режим.

При самостоятельном выборе высоты палок предлагаем схему подбора в зависимости от роста пользователя.

Наденьте темляки – правый на правую руку и левый на левую руку. Вставьте фиксатор темляка в рукоятку и убедитесь, что темляки прочно закреплены.

Изделие предназначено для многократного личного использования. Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.

**Состав:** Палка из одной алюминиевой и двух карбоновых трубок, рукоятка из пластика с пробковым покрытием, стальной наконечник, темляки из неопрена, наконечники (сменные насадки) из резины, чехол из терилена.

**Комплектность:**

Палки – 2 шт.

Темляки (правый и левый) – 2 шт.

Съёмные резиновые башмачки – 2 шт.

Чехол – 1 шт.

Инструкция – 1 шт.

**Правила ухода:**

Трубку и наконечник очищают от загрязнений с помощью чистой мягкой ткани. Для чистки трубки не используйте абразивные средства и щётки.

**Информация о правилах эффективного и безопасного использования:**

Не рекомендуется использовать палки без резинового башмачка при хождении по поверхностям с асфальтовым покрытием или мощеным плиткой.

**Гарантийный срок:**

6 месяцев со дня продажи.

**Гарантийными случаями не являются:**

- износ стальных штырей, резиновых башмачков, темляков, чехла;
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие как следствие нарушения инструкции по применению и правил ухода за изделием;
- не гарантийный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

**Срок годности:**

Не установлен.

**Правила хранения:**

Храните изделия в сухом чистом виде при температуре от -20°C до +35°C. Для хранения и транспортировки палок используйте чехол.

**Правила утилизации:**

По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации. Утилизировать с бытовым мусором.