



Средства реабилитации
инвалидов: трость Armed:
**FS910L, FS920L, FS927L,
FS929L, FS9206L, FS911L,
FS9276L, FS9306L**

ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед эксплуатацией подробно ознакомьтесь с настоящим Руководством!

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Средства реабилитации инвалидов: трость Armed: **FS910L, FS920L, FS927L, FS929L, FS9206L, FS911L, FS9306L, FS9276L** (далее по Руководству - трость) предназначена для людей, не полностью потерявших способность передвижения, облегчить нагрузку на организм, расширить зону досягаемости.

Трость можно использовать при ходьбе на улице или в домашних условиях.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Высота трости, мм	Максимальная нагрузка, кг	Вес нетто, гр
FS910L	900	100	300
FS920L	720-940	100	400
FS927L	780-880	100	300
FS929L	720-940	100	400
FS9206L	685-920	100	300
FS911L	840-1080	100	340
FS9306L	750-980	100	400
FS9276L	840-1070	100	300

Представленные в таблице параметры могут иметь отклонения в пределах 10 процентов.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед использованием необходимо проверить наконечник на предмет повреждений. Не используйте неисправную трость.
- Для телескопических тростей проверяйте, плотно ли защелкнут фиксирующий элемент.
- Во время ходьбы держите трость максимально вертикально.
- Не ставьте трость слишком далеко от себя.

5. Используйте трость только по прямому назначению. Не вешайте на трость сумки, пакеты и т.д.
6. При спуске или подъеме по лестнице всегда держитесь свободной рукой за поручень.
7. Зимой выходите на улицу с тростью, оснащенной устройством против скольжения.
8. Передвигайтесь очень осторожно по кафелю и незакрепленным коврам и половицам.
9. В случае падения постарайтесь откинуть трость в сторону, чтобы не упасть на нее.

ПОДБОР РАЗМЕРА

Чтобы определить правильную длину трости, нужно встать прямо, не снимая обуви. Опустить руки по бокам. Длина трости должна равняться расстоянию от линии изгиба запястья до пола. Высота рукоятки под кисть должна быть такой, чтобы локтевой сустав находился в положении сгибания под углом 10-15 градусов.

Правильные размеры трости важны для обеспечения эффективного и безопасного передвижения.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Влажная обработка мыльными растворами без применения абразивных чистящих средств.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

1. Трость в упаковке завода-изготовителя должна храниться в закрытом помещении при температуре от +5 до + 40 °C, относительной влажности не более 95%.
2. В воздухе помещения не должно содержаться примесей, вызывающих коррозию.
3. Трости транспортируют всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444-92 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
4. Транспортировка и хранение трости без упаковки завода-изготовителя не гарантирует сохранность трости. Повреждения трости, полученные в результате транспортировки или хранения без упаковки завода-изготовителя, устраняются потребителем.
5. Трости не содержат вредных веществ и компонентов, представляющих опасность для здоровья людей и окружающей среды в процессе и после окончания срока службы и при утилизации.

Утилизация тростей осуществляется отдельно по группам материалов, согласно соответствующей нормативной документации.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Средство реабилитации инвалидов: трость _____ 1 шт.

Руководство _____ 1 экз.

ПРИМЕЧАНИЕ: Предприятие-изготовитель систематически ведет работу по улучшению конструкции тростей, поэтому возможны некоторые изменения, не отраженные в настоящем Руководстве.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Средства реабилитации инвалидов: трость **Armed: FS910L, FS920L, FS927L, FS929L, FS9206L, FS911L, FS9306L, FS9276L** соответствуют техническим условиям и признаны годными для эксплуатации.

Регистрационное удостоверение № ФС3 2010/07911 от 08.10.2010 г.

Произведено: "Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory, (LTD)",

5 Xingfu Rd, zone A, Shishan Industrial Park, Nanhai District, Foshan City, China

"Фошан Донфанг Медикал Эквипмент Мануфактори (Лтд)",

5 Ксингфу Рд, зона А, Шишан Индустрисл Парк, Нанхай Дистрикт, Фошан Сити, Китай

Импортер: ООО «Медимпорт»

630091, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Советская, дом 52, пом. 14, оф. 211

www.armed.ru

Торговая марка «АРМЕД» (495) 989-12-88, (812) 702-73-02, (343) 286-42-73

Срок службы - не менее 3 лет.

Гарантийный срок - 12 месяцев с даты продажи при выполнении требований настоящего Руководства.

На быстроизнашиваемые части гарантия не распространяется.

Доставка в сервисный центр и обратно осуществляется за счет клиента.

Сервисный центр:

195197, г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера, д. 21, корп. 3, лит. А, пом. 13-Н

Телефоны сервисных центров:

Моск. обл. г. Балашиха: (495) 989-12-89

г. Санкт-Петербург: (812) 702-73-02

г. Екатеринбург: (343) 357-33-61